

## רמפה ניידת מתקפלת מאלומיניום - מדריך הוראות

משקל מעמס מרבי מותר הינו 272 ק"ג (סיווג המשקל מבוסס על פיזור עומס שווה על שני הצירים).

### 1. אזהרות

- 1.1 אין לחרוג ממגבלת העומס המותרת על המשטח.
- 1.2 יש לנקוט באמצעי זהירות בעת עלייה וירידה.
- 1.3 בצעו עליה וירידה רק על משטח יציב וישר.
- 1.4 אין לעמוד בנתיב של המתקן או הרכב. הרחיקו עוברי אורח וילדים מאזור התנועה.
- 1.5 אין להשאיר רמפות פתוחות ללא השגחה.
- 1.6 הזהרו מאזורי הצירים. הרחיקו את גופכם מאזורים אלו.
- 1.7 המשטח יהיה חלק יותר כאשר הוא רטוב. נקטו באמצעי זהירות.
- 1.8 בצעו פתיחה ואבטחה של המשטח לפני השימוש.
- 1.9 הרמפה אינה צעצוע. אין לעשות בה שימוש כמשטח לקפיצה, פיגום, גשר, סולם או כל שימוש אחר שאינו השימוש המקורי אליו היא יועדה.
- 1.10 וודאו תמיד שקצה המשטח מחובר ומאובטח למדרגה, למשטח או לרכב לפני התחלת השימוש. אנו ממליצים בחום על השימוש בפיני אבטחה בכדי למנוע תזוזה וקפיצה של המשטח בעת השימוש.
- 1.11 יש לפעול תמיד בהתאם להמלצות היצרן לגבי כיסא הגלגלים או הקלנועית.

### 2. הנחיות תפעול

- 2.1 העלאת כיסא גלגלים
  - מקמו את כיסא הגלגלים בכיוון הרמפה כאשר הגלגלים הקדמיים פונים קדימה. גלגלו או דחפו את כיסא הגלגלים באיטיות וביציבות אל הרמפה כאשר אתם מוודאים שהגלגלים נעים במרכז המשטח.
  - נקטו באמצעי זהירות מיוחדים במקרה של משטחים רטובים בכדי למנוע החלקה של הגלגלים על המשטח.
- 2.2 הורדת כיסא הגלגלים
  - מקמו את הרמפה קרוב ככל הניתן מאחורי הגלגלים האחוריים של כיסא הגלגלים. אפשרו לכיסא הגלגלים להתגלגל אחורה במורד הרמפה. כאשר הגלגלים ממורכזים על הרמפה.
  - וודאו תמיד נוכחות של מסייע בעל הכשרה מתאימה בעת שימוש ברמפה.

### 3. תחזוקה

- 3.1 באחריות המשתמש לבדוק את הרמפה ואת חלקיה לפני כל שימוש. במידה ונמצא נזק לרמפה, יש להפסיק באופן מיידי את השימוש בה.
- 3.2 יש לבצע ניקיון שיגרתי לרמפה וכן לשמן באופן תקופתי את הצירים.